
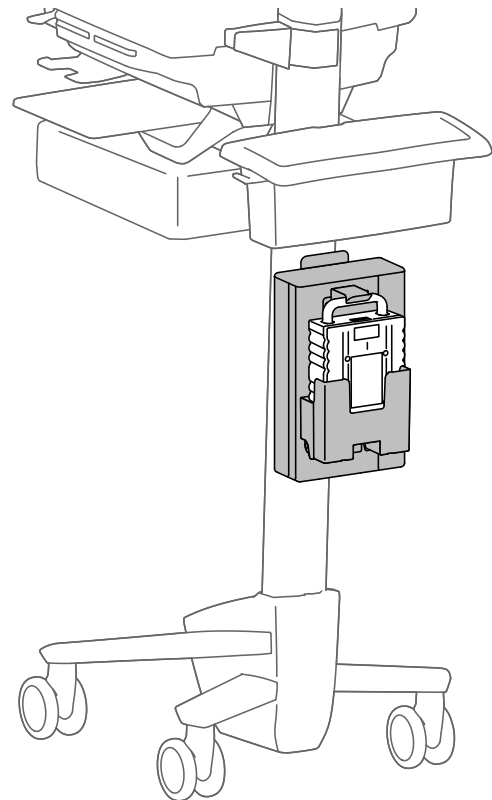


## StyleView LiFe Power Upgrade System 330Wh LiFe battery

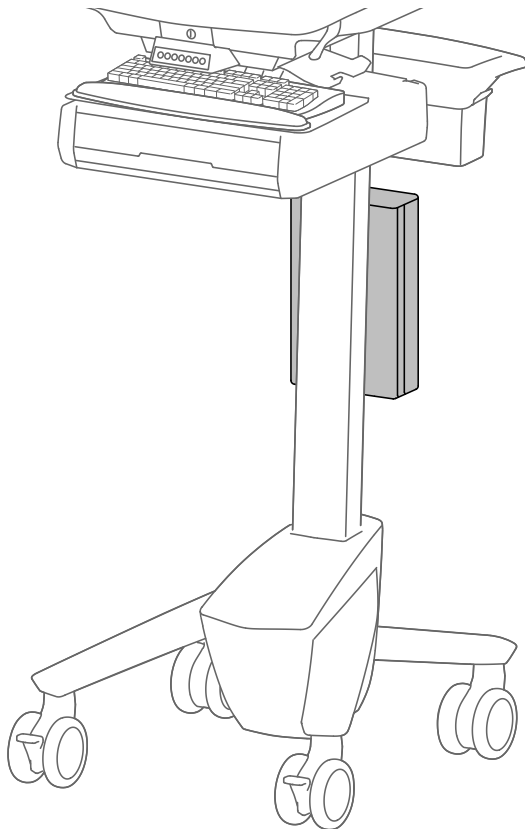

Uppgraderingssystemet StyleView LiFe Power är ämnat att tillhandahålla växelström för att stödja datorutrustning som försörjs med växelström.

Denna installationshandledning är endast ämnad för installation på en Ergotron-vagn. Information om strömsystemsinformation finns i den medföljande bruksanvisningen.

För den senaste Installationshandboken se: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)



**User's Guide - English**  
**Guía del usuario - Español**  
**Manuel de l'utilisateur - Français**  
**Gebbruikersgids - Nederlands**  
**Benutzerhandbuch - Deutsch**  
**Guida per l'utente - Italiano**  
**Användarhandbok - svenska**  
ユーザーガイド: 日本語  
用户指南 : 汉语



[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600


China 86-769-86018920


# Säkerhet

Denna installationshandledning är endast ämnad för installation på en Ergotron-vagn. Information om strömsystemsinformation finns i den medföljande bruksanvisningen.


- Strömmen stängs av när batteriet avlägsnas om inte strömmodulen är inkopplad i AC-vägguttaget.
- När batteriet inte används under längre perioder, bör batteriet vara helt laddat innan man förvarar det och laddas med jämna mellanrum under förvaringen.


 **WARNING:** Ladda INTE batteriet med någon annan laddare.


 **WARNING:** För låg spänningsåterhämtning, koppla ifrån alla elintag och -uttag (kablar och batteriet), vänta i 30 sekunder och anslut alla in- och utgångar igen.


 **WARNING:** Förvara batterierna svalt eller i rumstemperatur:


- Laddningstemperatur: 0 °C-40 °C (32 °F-113 °F)
- Urladdningstemperatur: -10 °-40 °C (14 °F-104 °F)
- Förvaringstemperatur: -50 °-65 °C (-58 °F-149 °F)


 **WARNING:** försök aldrig att öppna eller serva batteriet.


 **WARNING:** undvik att tappa, punktera eller krossa ett batteri eller exponera det för vatten.

 **WARNING:** använd INTE batteriet om fysiska skador är uppenbara.

 För att undvika risken för elstötar, utsätt inte elektriska komponenter för vatten, rengöringsmedel eller andra potentiellt frätande vätskor eller ämnen.

 Kablar – Håll kablar pryddigt organiserade på vagnen (ett antal lösningar finns på vagnen till detta ändamål). Lös kabel bör hållas borta från rörliga komponenter med kabelklämmor. Se avdelningen om kabeldragning i denna vägledning eller kontakta Ergotrons kundtjänst för mer information.

 Kundens utrustning – Säkerställ att utrustningen är i balans och säkert monterad på vagnen. Placera inte om vagnens komponenter på risern eller tornet om du inte instrueras att göra detta i installationsinstruktionerna. Att flytta vagnen med komponenterna för högt eller lågt placerade på risern kan ge upphov till instabilitet som leder till skada på utrustningen eller till och med personskada. Kontakta Ergotrons kundtjänst för att få information om flyttning av vagnens komponenter.

 **WARNING:** I sällsynta fall, om elsystemet och skyddsfunktionerna för batteriet slutar att fungera, kan batteriet överladdas och i vissa fall bli extremt hett, möjligen smält plast och avge rök. Om ett batteri börjar ryka eller smälta:

- Koppla från vagnen, eller koppla, om möjligt, omedelbart bort batteriet från elsystemet.
- Flytta vagnen till en väl ventilerad plats.
- Använd en brandsläckare med koldioxid, pulver eller lämpligt skum för att spreja det varma batteriet.

Om ingen brandsläckare är tillgänglig, använd rikliga mängder vatten eller täck batteriet med sand.

Om någon utsatts för batteriets innehåll, ska han eller hon omedelbart uppsöka läkarvård och följa nedanstående riktlinjer.


Exponering för ånga från batteriet är irriterande för ögon, hud, slemhinnor och luftvägar. Detta kan orsaka illamående, yrsel och huvudvärk.

Vid direktkontakt till batteriets elektrolyt:


- Skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 15 minuter.
- Skölj noga händerna och andra påverkade områden med vatten.
- Ta genast av och tvätta förorenade kläder.

I samtliga fall ska läkarvård omedelbart uppsökas!


# Säkerhet


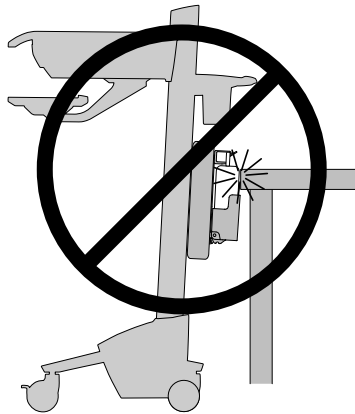


**VAR AKTSAM!**  
Låt inte batteriet slå i någonting. Försummelse att följa dessa anvisningar kan leda till att utrustningen skadas.

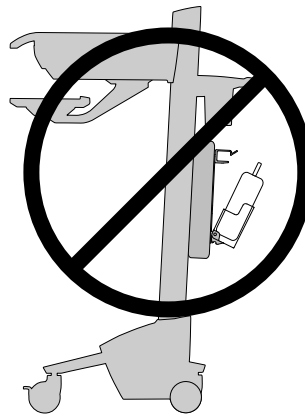



**VAR AKTSAM!**  
Flytta inte vagnen när batteriet inte är fäst i selen. Se till att batteriet sitter ordentligt i selens underdel och att det är ordentligt fäst i den övre delen. Försummelse att följa dessa anvisningar kan leda till att utrustningen skadas.

 **VARNING!** Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till att man skapar ett medicinskt system som kan ha en minskad säkerhetsnivå.

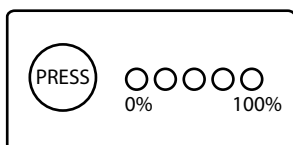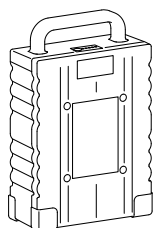

Batteridisplay:

- Tryck på knappen "TRYCK" på batteriet för att visa hur mycket ström som finns kvar i procent.
- 1 gul och 4 gröna LED-lampor anger att batteriet är helt laddat, 100%.
- 1 blinkande gul LED-lampa indikerar att mindre än 10 % av batteriets kapacitet återstår. Batteriet är då redo att bytas ut med ett laddat batteri eller att laddas genom att koppla in elkabeln i AC-vägguttaget.

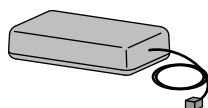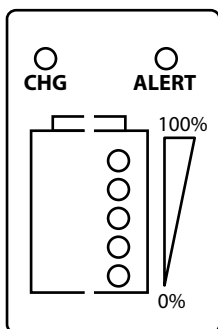


Indikator för laddningsstatus (State of Charge Indicator (SOC)): Display:

- 1 gul och 4 gröna LED-lampor anger att batteriet är helt laddat, 100%.
- 1 blinkande gul LED-lampa indikerar att mindre än 10 % av batteriets kapacitet återstår. Batteriet är då redo att bytas ut med ett laddat batteri eller att laddas genom att man kopplar in elkabeln i AC-vägguttaget.


# Komponenter

	A	B	C	D	E	F
1	1x	1x	1x		2x  M5 x 10mm	4x  8-32 x 5/8"
2	2x		2x	1x	1x	4x  8-32 x 3/8"
						1x


## Verktyg som behövs

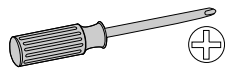

**1** Fäst monteringskonsolerna på strömmodulen.

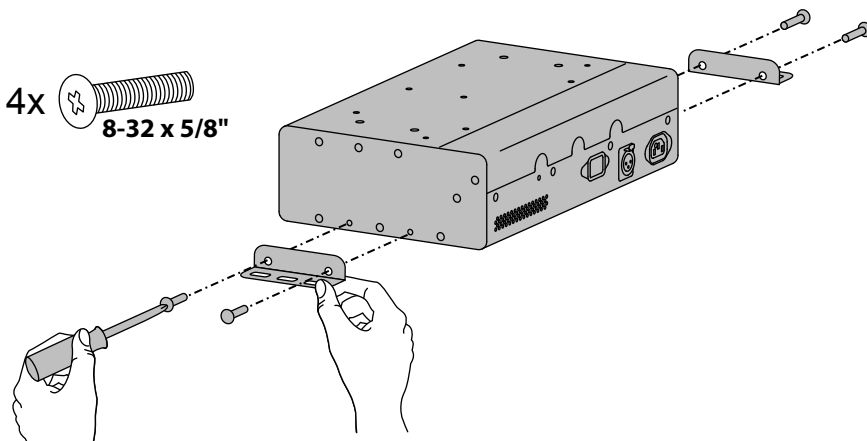


**2** a. Avlägsna dessa fyra skruvar från strömmodulen.  
b. Fäst batterihållaren på strömmodulen.

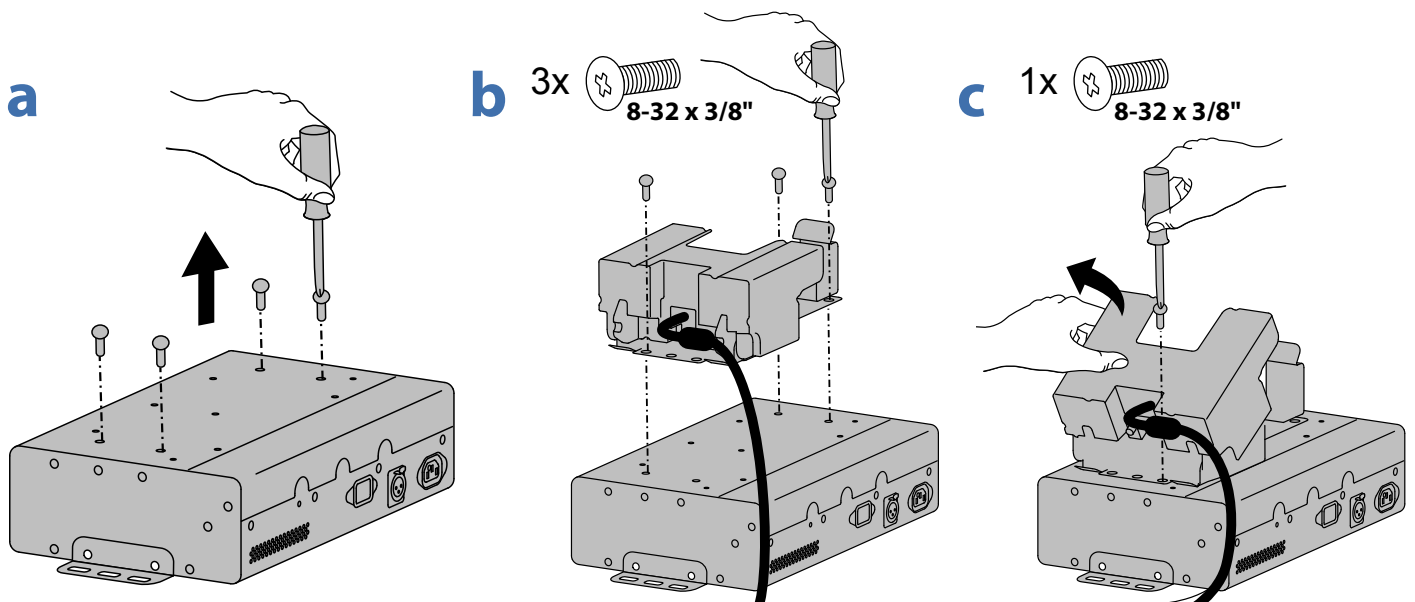

# 3 Fäst strömmodulen på vagnen.


## VAGNSMONTERINGSALTERNATIV

### SV40/SV41 VAGN

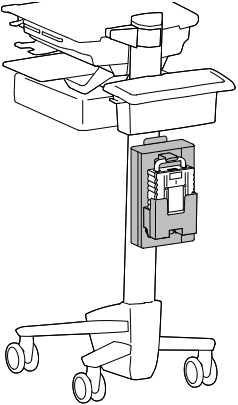


### VAGN MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN: SV31 NEO-FLEX WIDEVIEW WORKFIT C

*Dubbla T-spårsfäste - säljs separat*

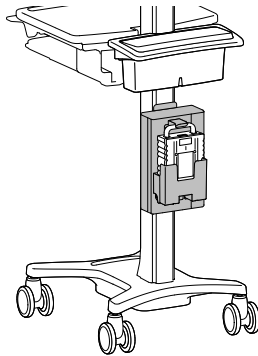


### NEO-FLEX VAGN




*Monteringsfästen  
säljs separat*

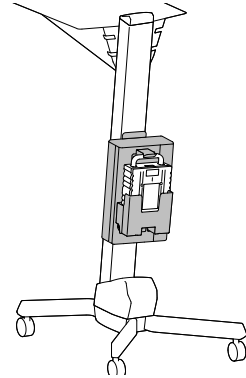


# 4a

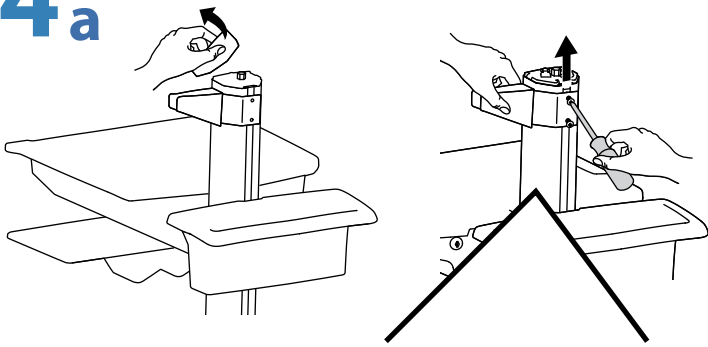


# b

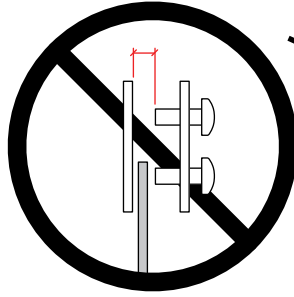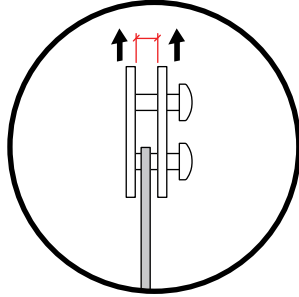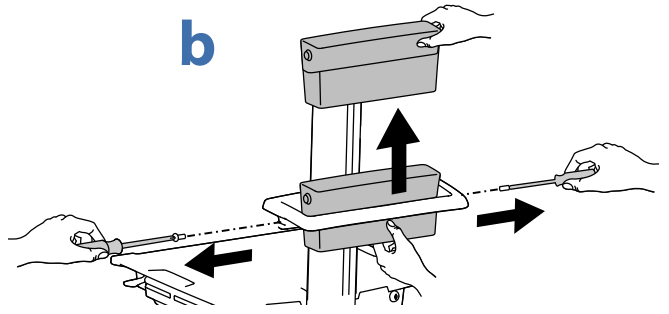





# c

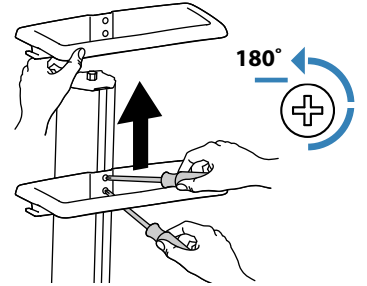



# 5

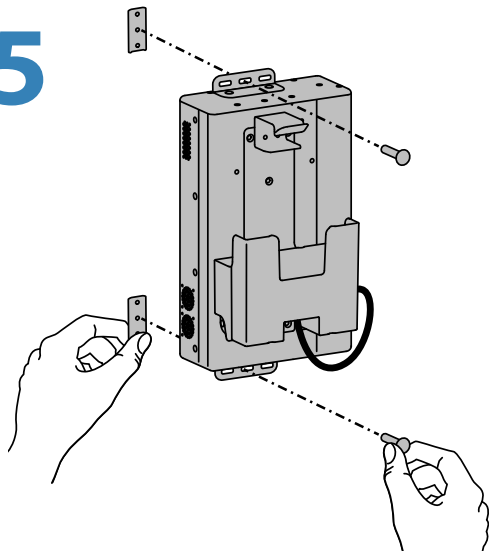

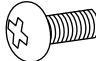2x  M5 x 10mm

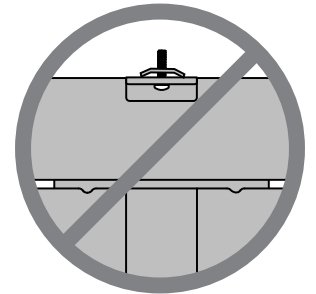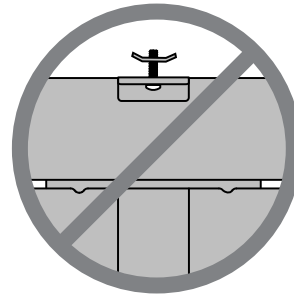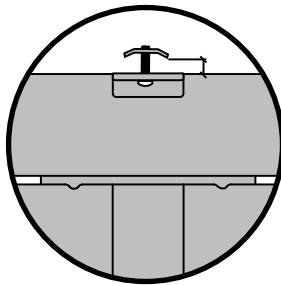


# 6

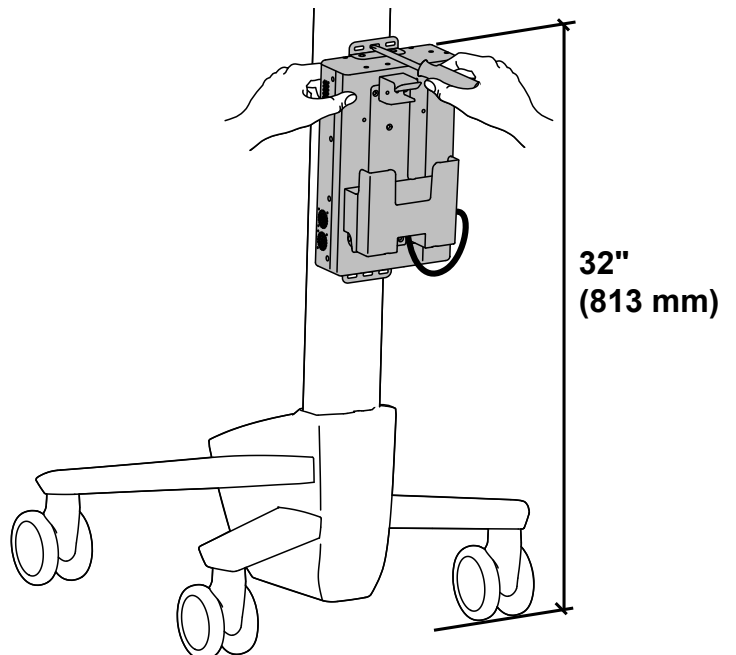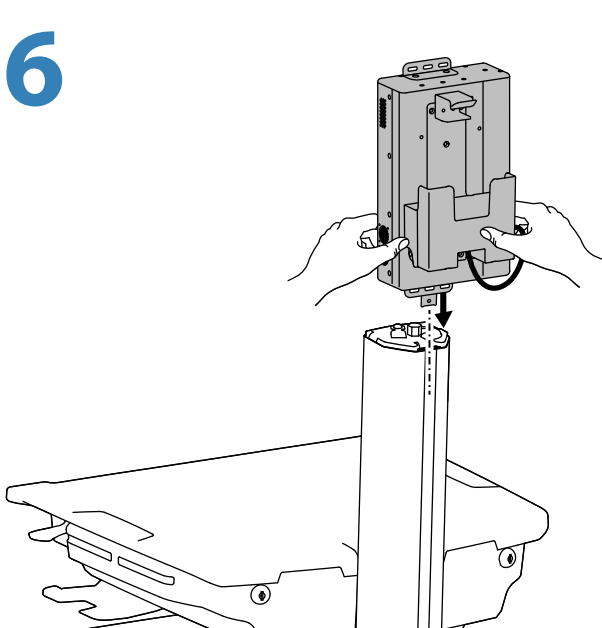


SVENSKA


**7** Avlägsna strömodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.

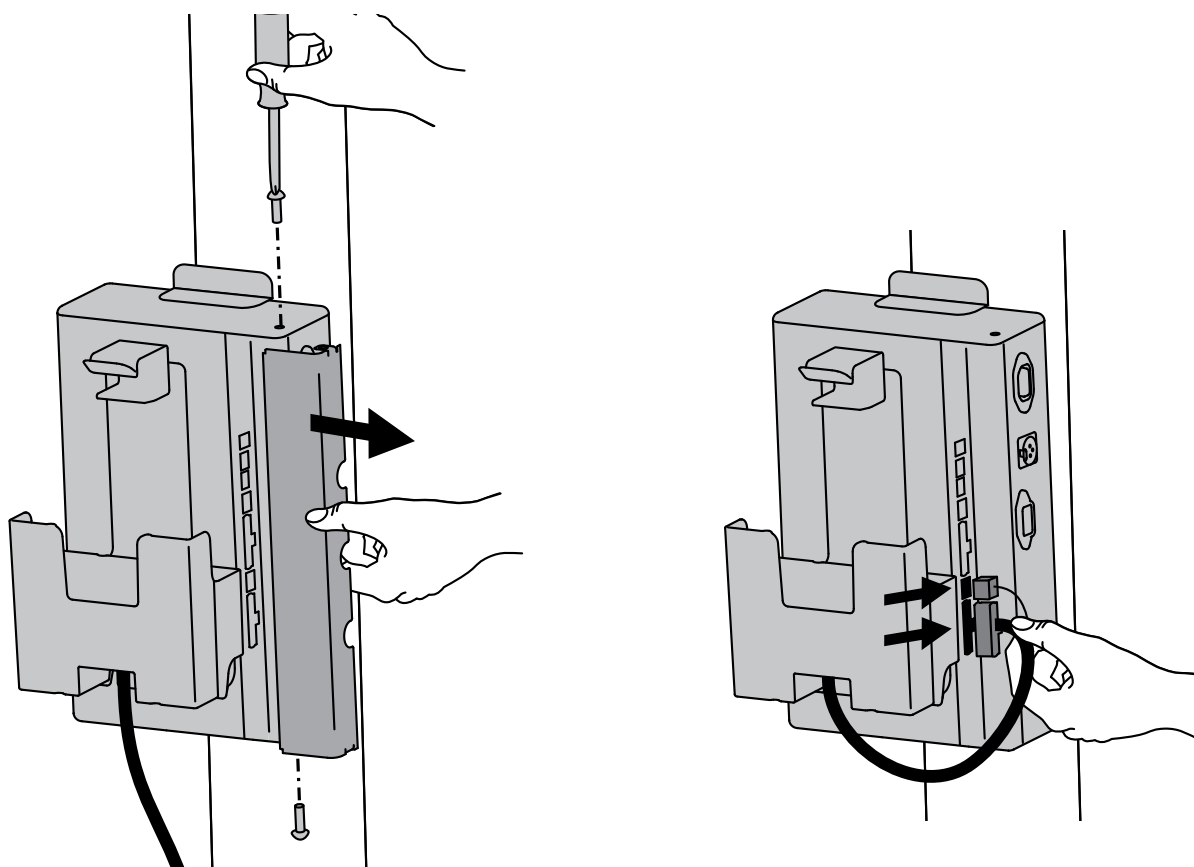



**8** Öppna arbetsyta.

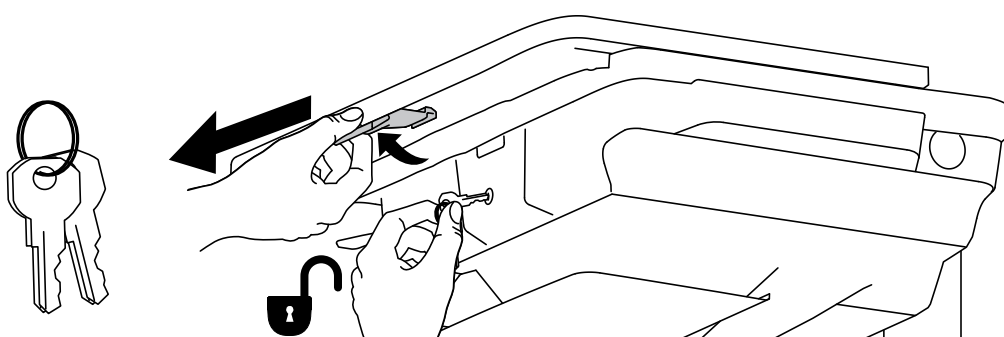


**9 a** Fäst SOCI på arbetsytan enligt illustrationen för varje konfiguration.

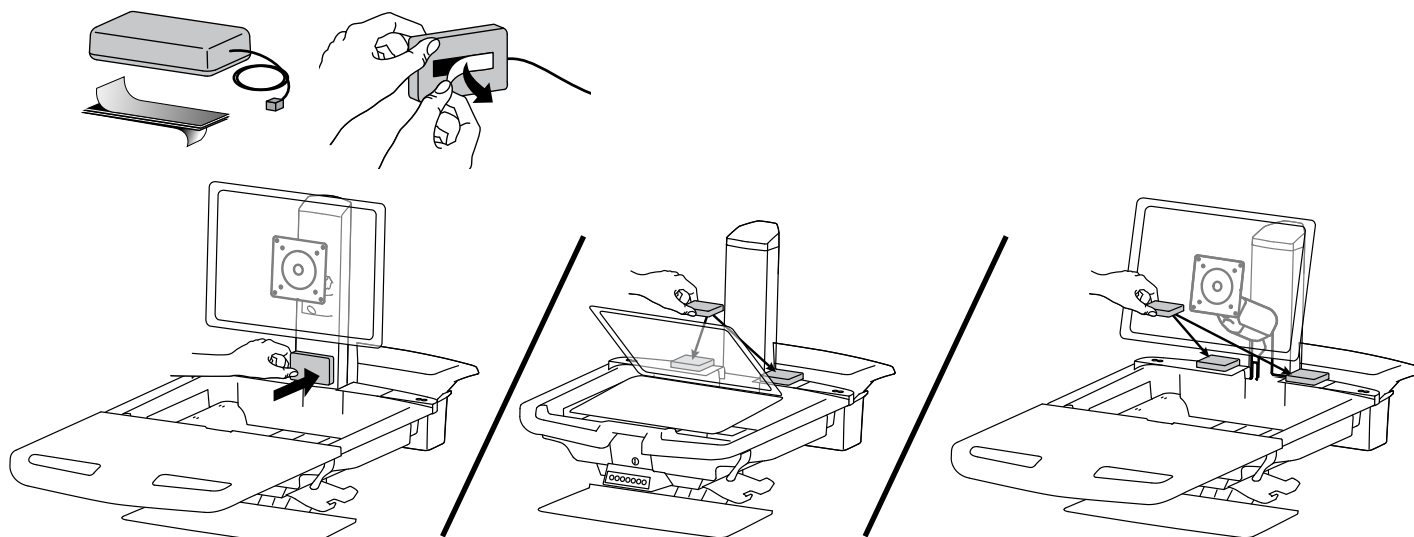

**b** Dra SOCI-kabeln ner genom botten på höljet och koppla in den i strömmodulen.

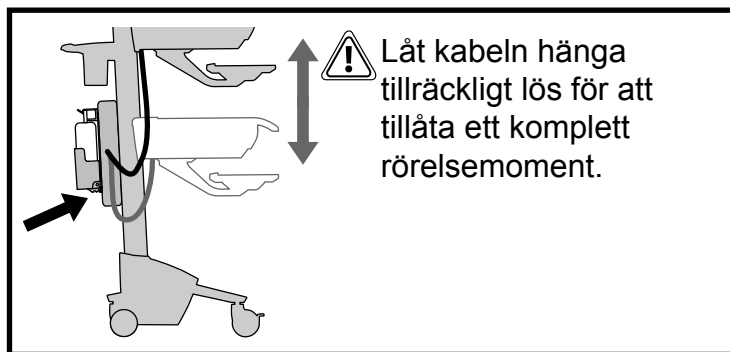
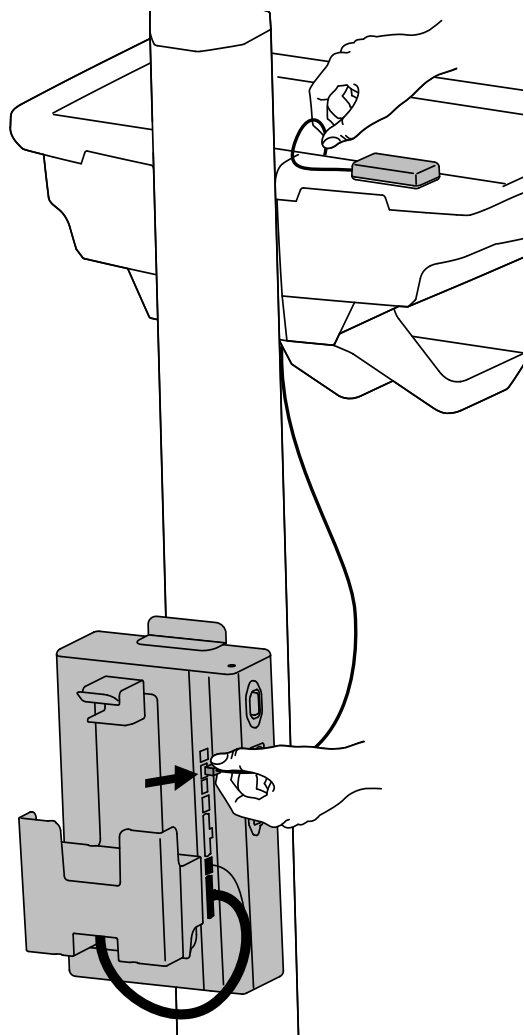


**c** Sätt fast strömmodulens kåpa igen.

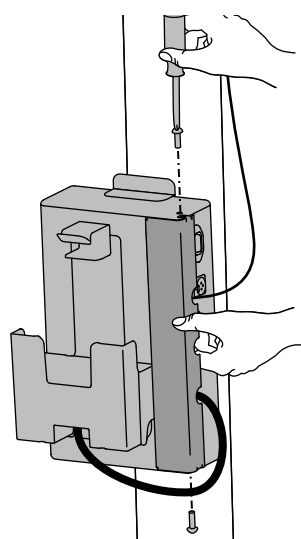

**10** Dra grenuttaget från insidan av höljet ner till strömmodulen.

Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.

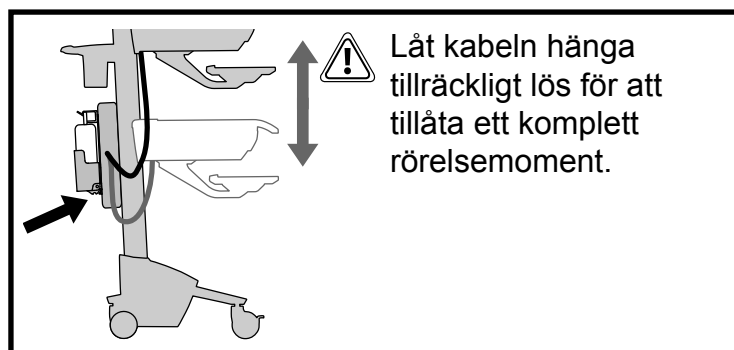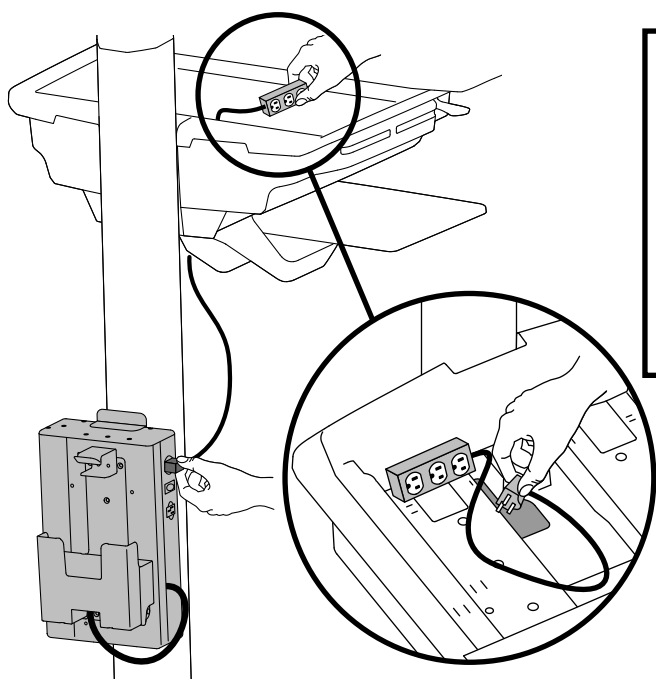


**!** VARNING! Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till att man skapar ett medicinskt system som kan ha en minskad säkerhetsnivå.




# 11

Stäng arbetsyta.

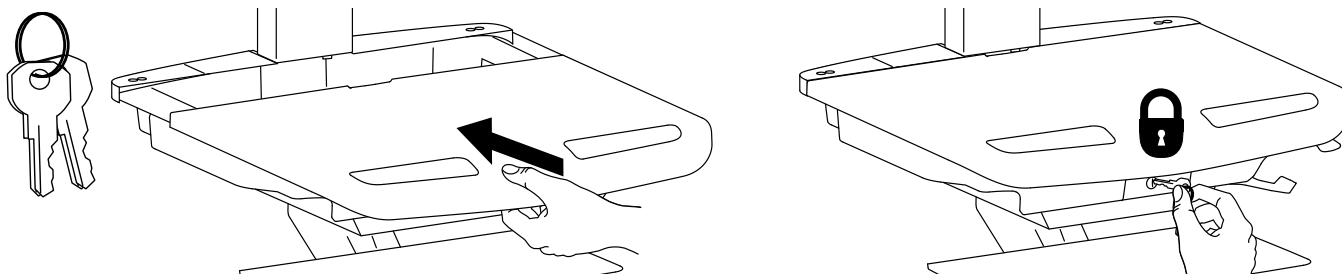


# 12


a

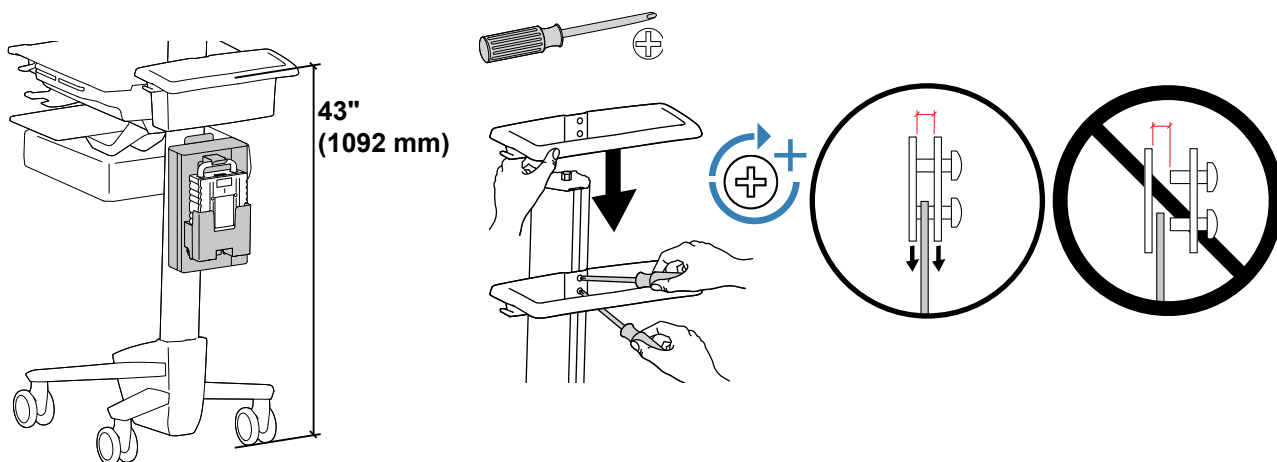


b

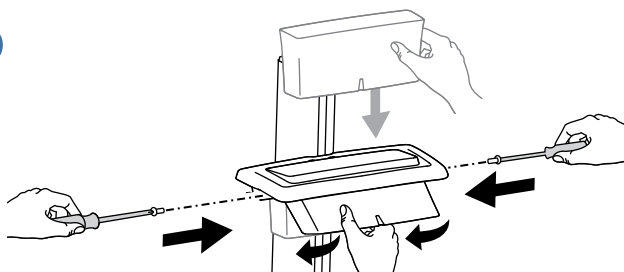

c

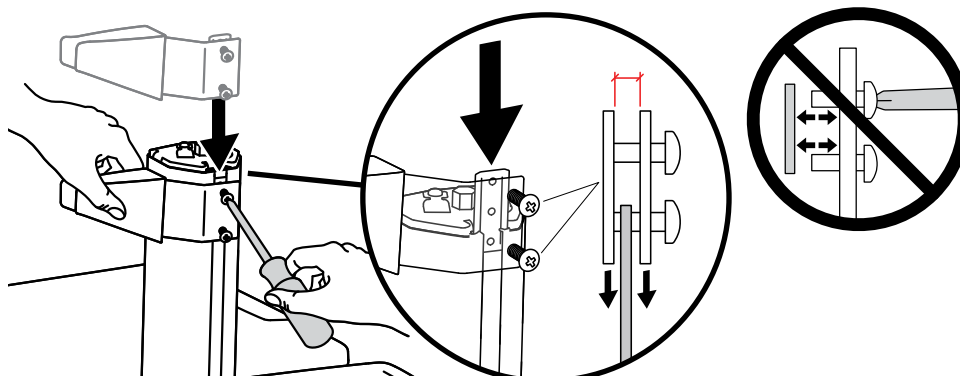


d

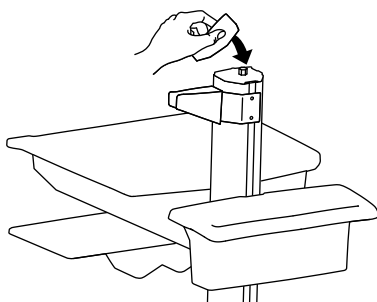

# 13



Anslut spiralkabeln till strömmodulen och häng kabeln på handtagets bakre del.

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

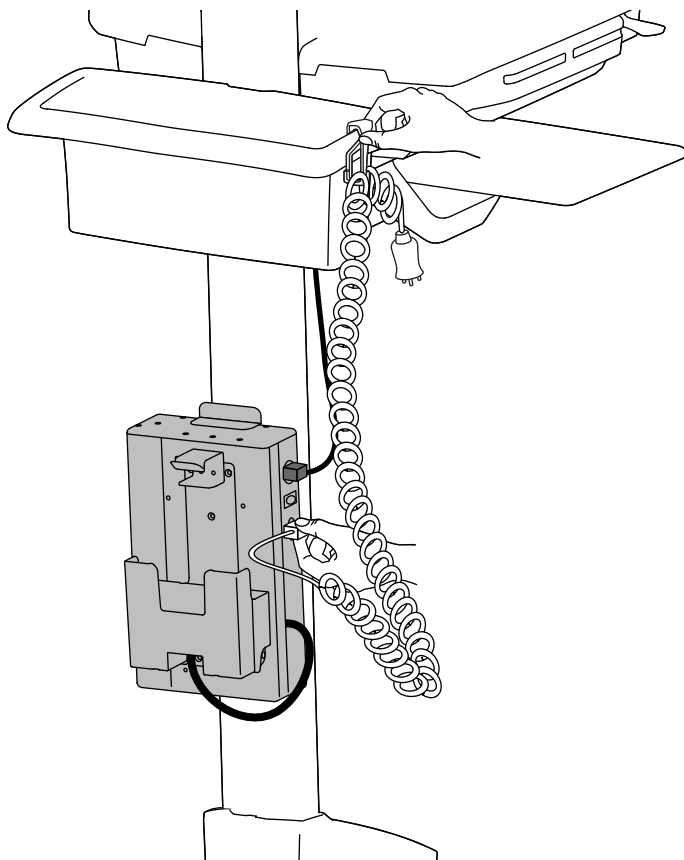

# 14

ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

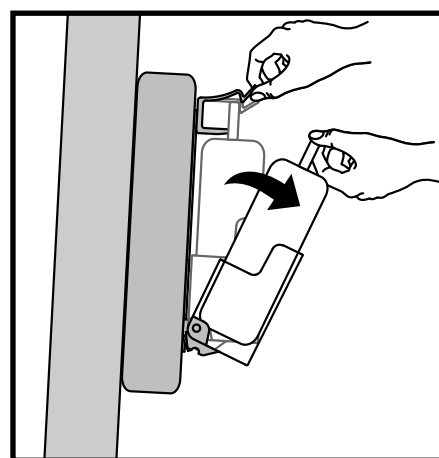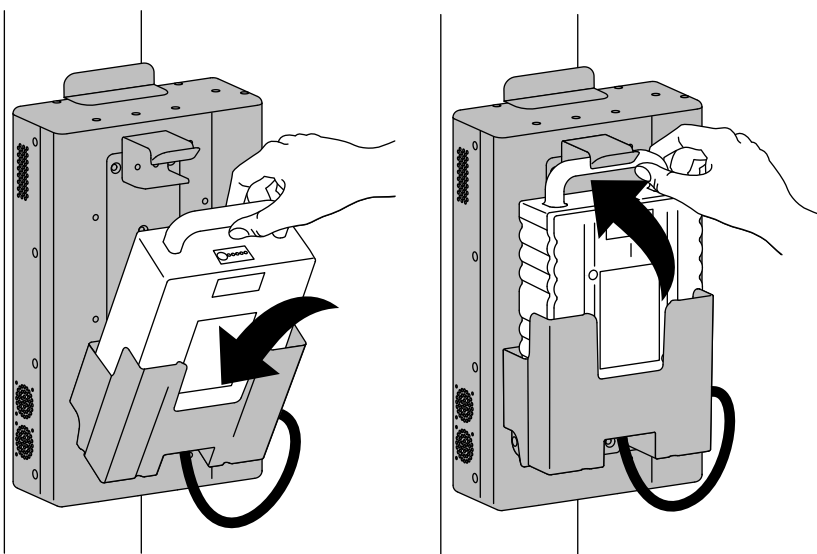


Avlägsna batteriet


**SLUT PÅ INSTALLATIONEN**

## VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:

SV31  
NEO-FLEX WIDEVIEW  
WORKFIT C

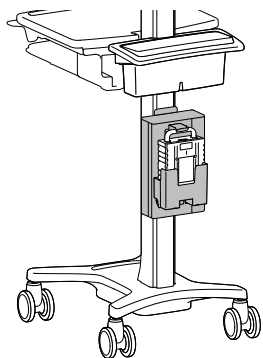


**VAR AKTSAM: FALLRISK**  
Montera INTE utanför mittpositionen på vagnens bakre hörn. Om du gör det skapas en ostabil situation som kan leda till personskada eller skada på utrustningen.

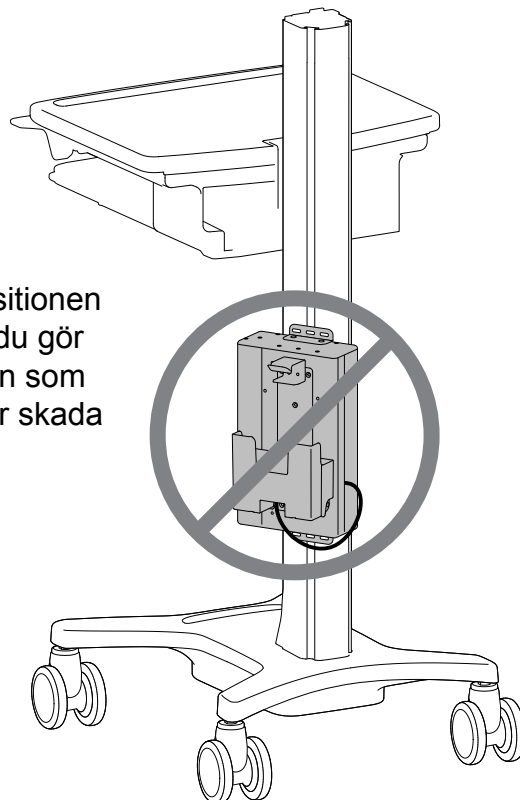

Dubbelt T-spårsfäste -  
beställs separat  
(För mittmontage  
på baksidan av vagnen)


**4** Följ instruktionerna som medföljer fästena.

**5** Fäst strömmodulen på monteringskonsolerna.


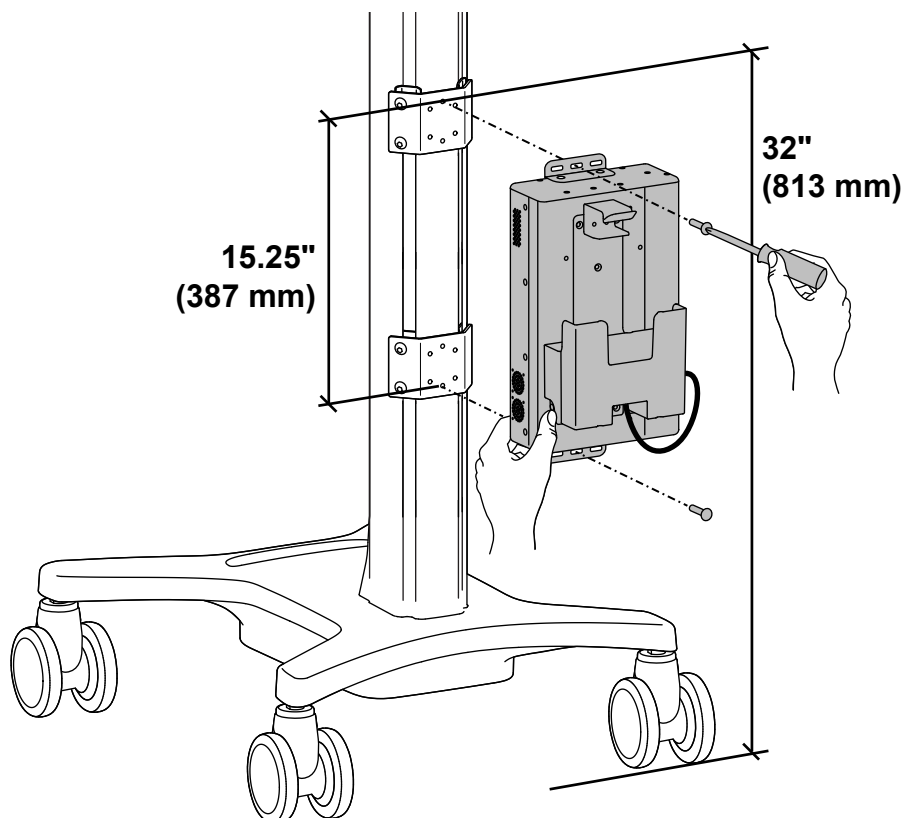


## VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:


**6** Avlägsna strömmodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.

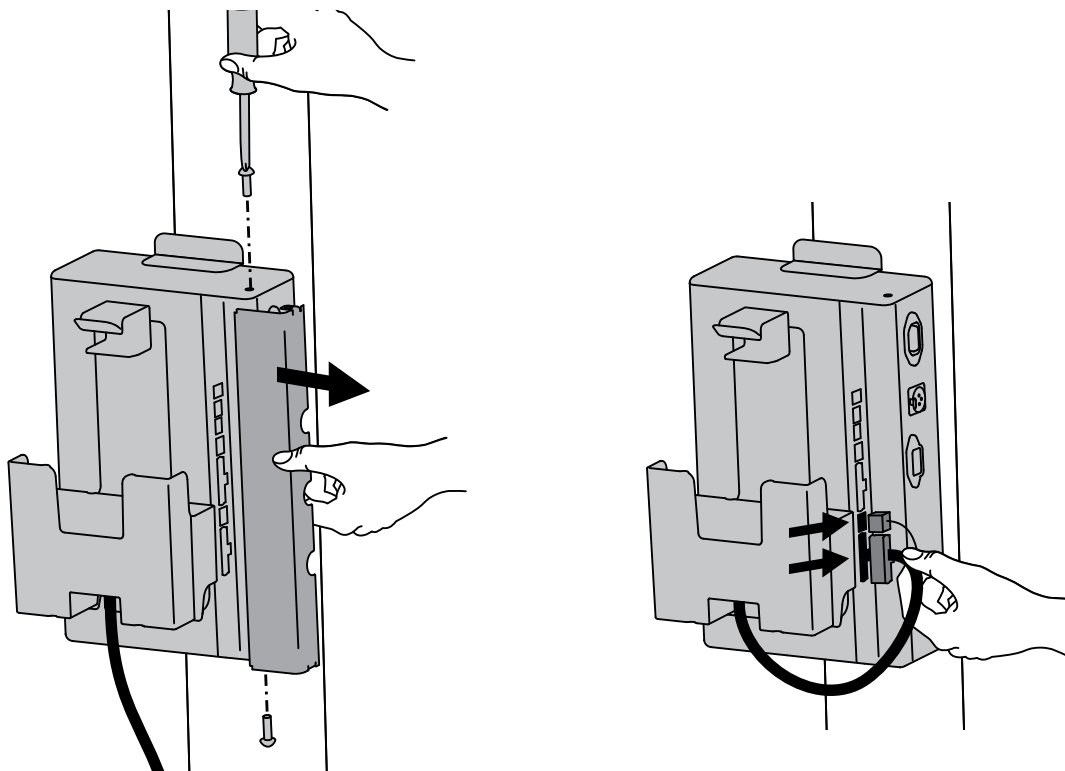

**7 a** Fäst SOCI på arbetsytan, dra sedan kabeln nedåt och koppla in den i strömmodulen.

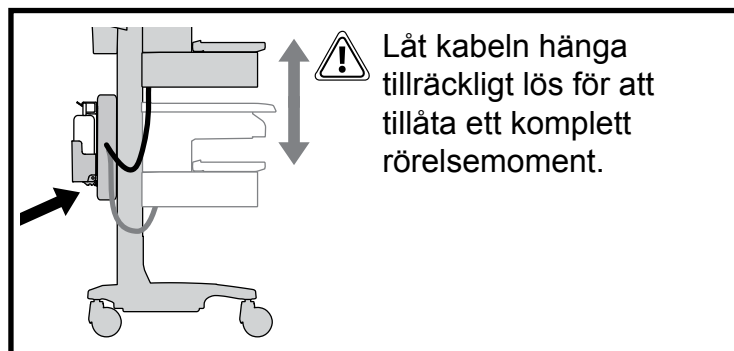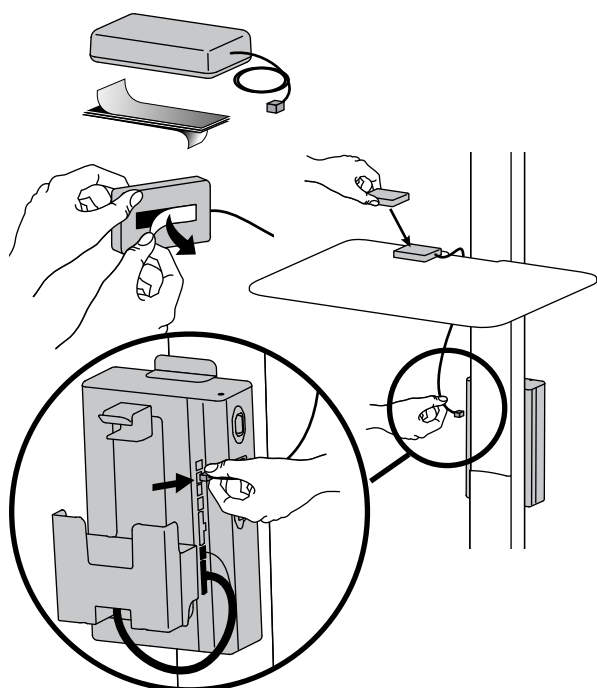



**b** Sätt fast strömmodulens kåpa igen.

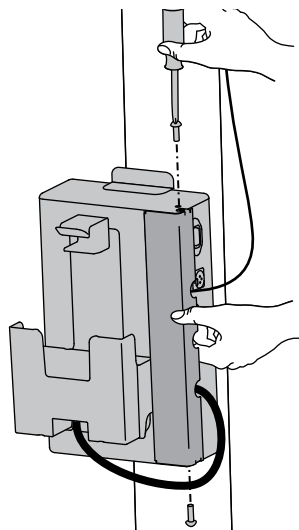

## VAGNAR MED DUBBLA T-SPÅR PÅ BAKSIDAN AV VAGNEN:

### 8 Fäst grenuttaget.


Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.

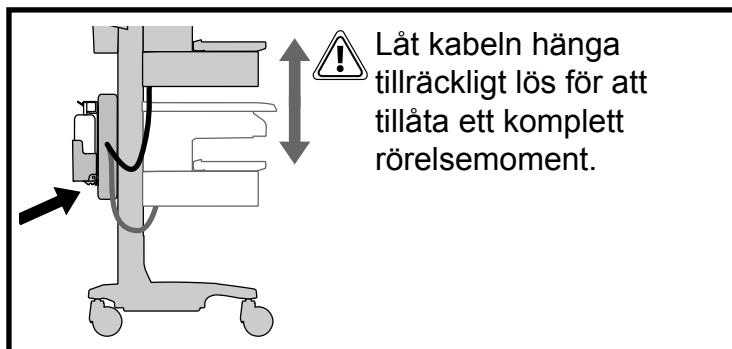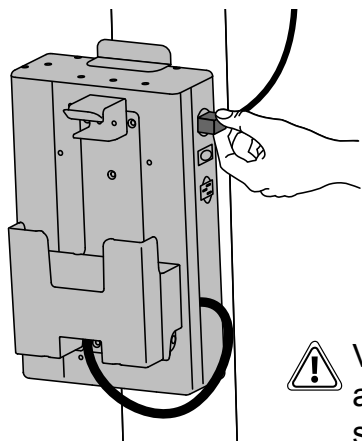




**VARNING!** Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till att man skapar ett medicinskt system som kan ha en minskad säkerhetsnivå.

### 9 Fäst spiralkabeln.

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

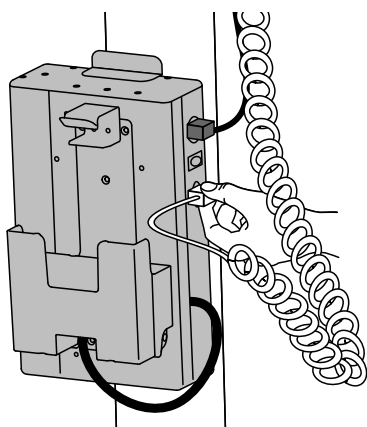


### 10 ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

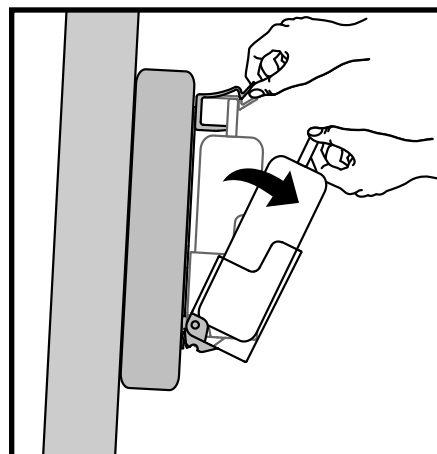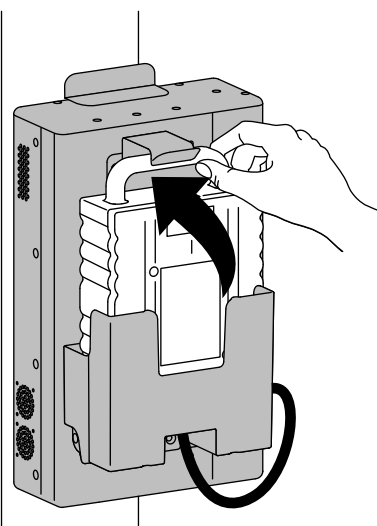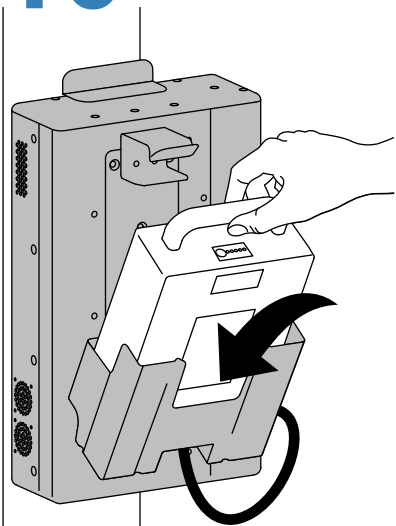

Avlägsna batteriet

**SLUT PÅ INSTALLATIONEN**

## NEO-FLEX

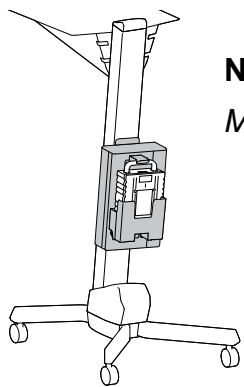


### NEO-FLEX


*Monteringsfästen beställs separat*

**4** Följ instruktionerna som medföljer fästen.



**5** Fäst strömmodulen på monteringskonsolerna.

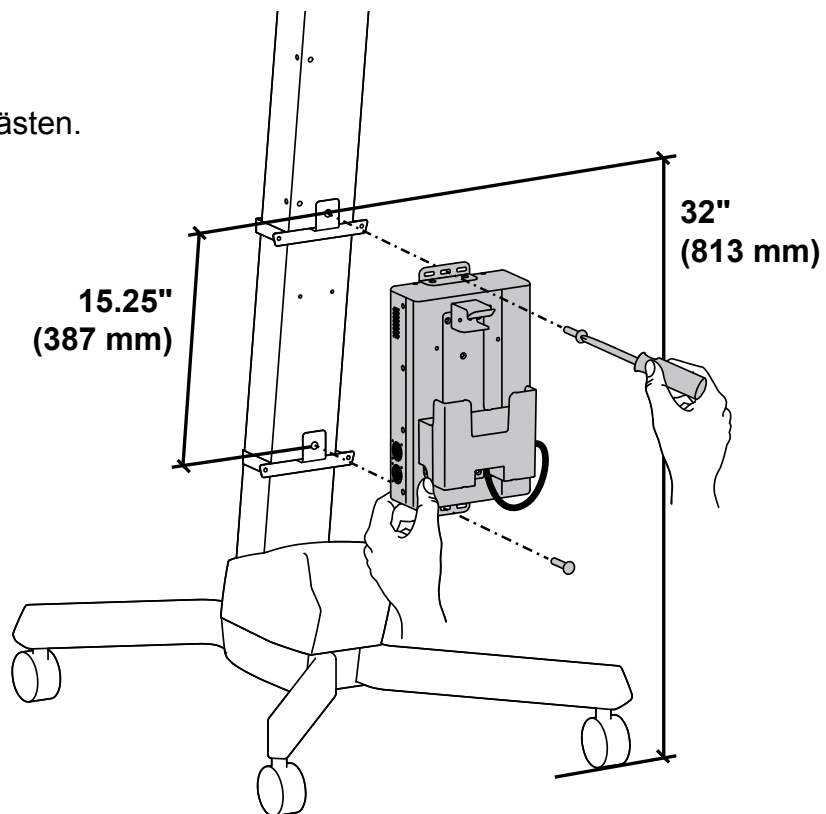


**6** Avlägsna strömmodulens kåpa och koppla in batteriets kabel.

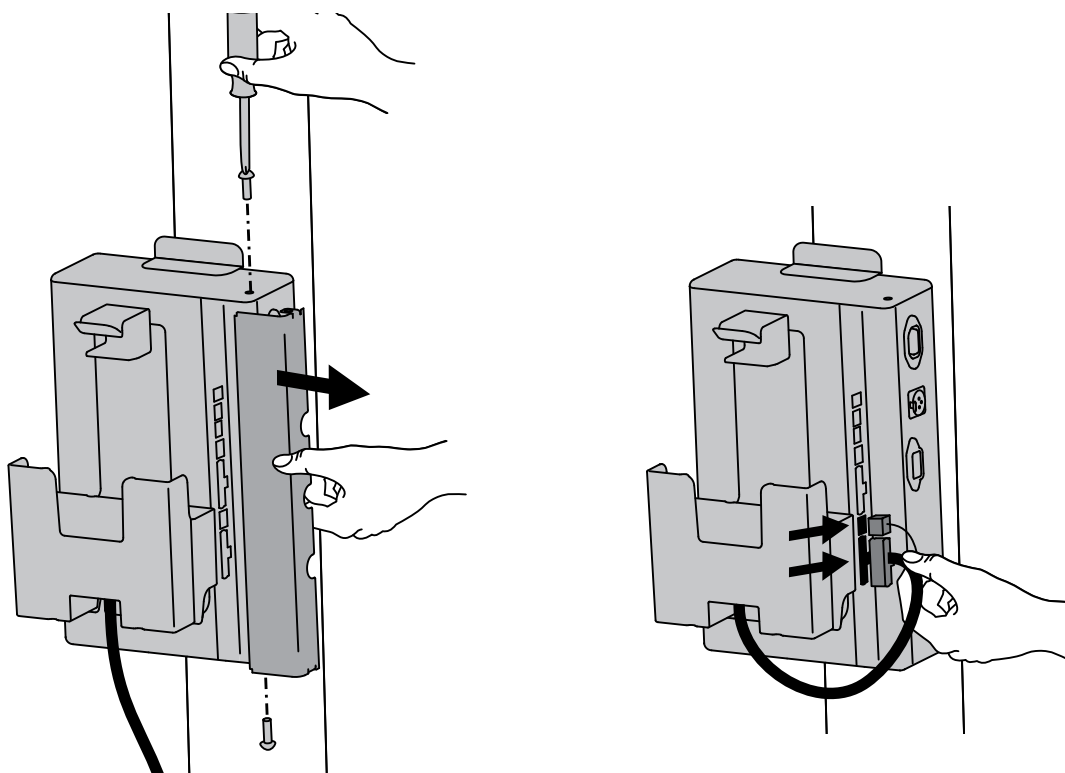

## 7 a Fäst SOCI på arbetsytan, dra sedan kabeln nedåt och koppla in den i strömmodulen.

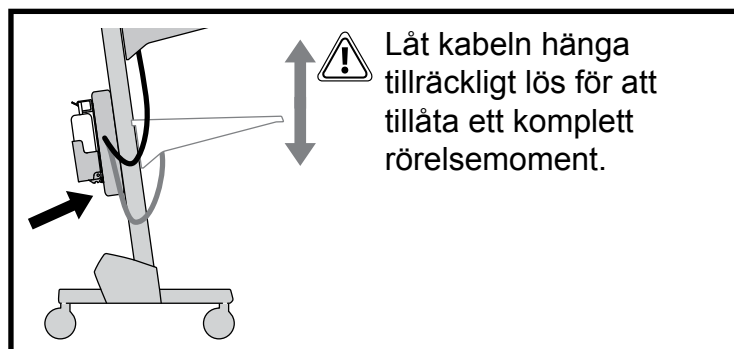
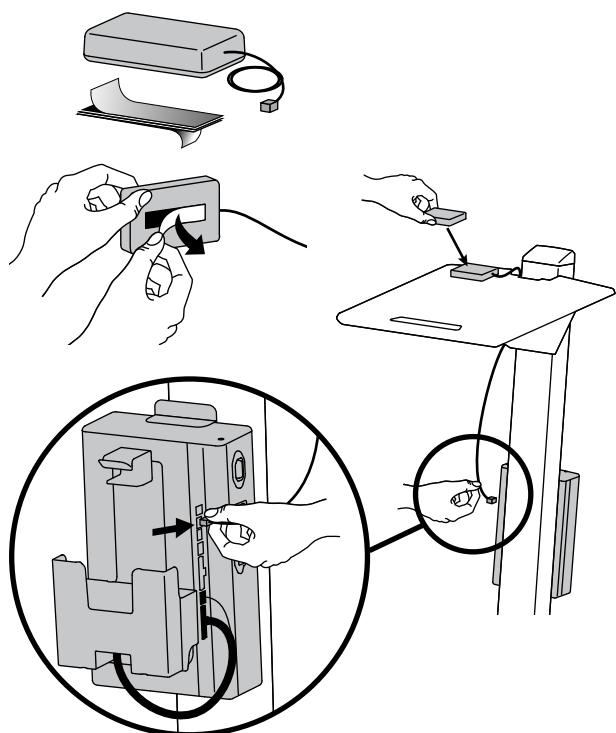


## b Sätt fast strömmodulens kåpa igen.

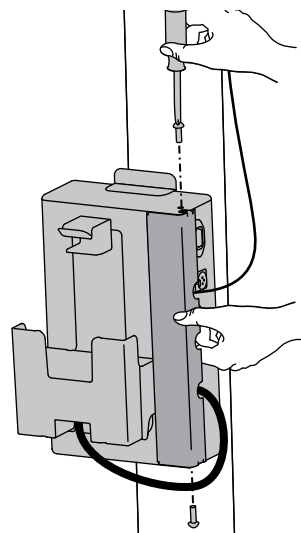


## 8 Fäst grenuttaget.

Grenuttaget bör användas för att ansluta din utrustning.

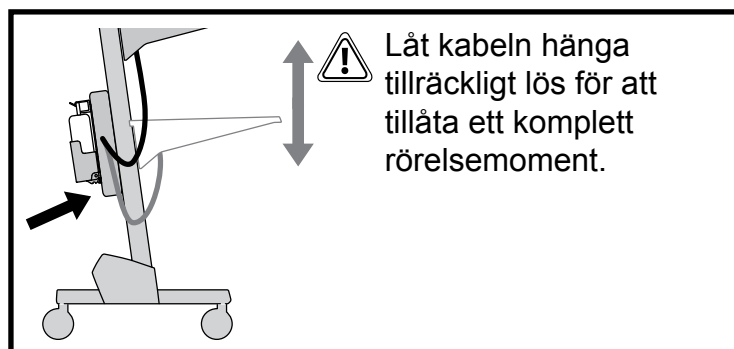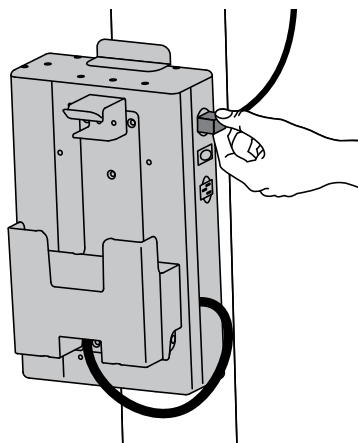




**! VARNING!** Anslutning av elutrustning direkt till uttaget leder till att man skapar ett medicinskt system som kan ha en minskad säkerhetsnivå.

# 9 Fäst spiralkabeln.

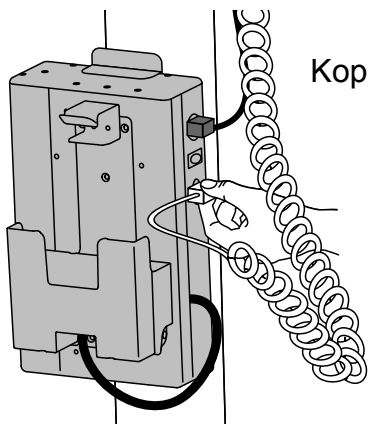

Koppla in spiralkabeln i vägguttaget för att ladda batteriet.

# 10 ANSLUT/AVLÄGSNA BATTERI

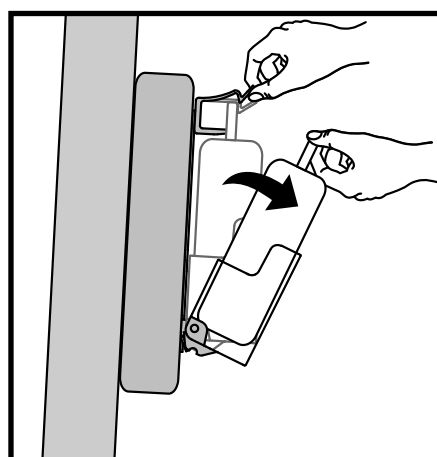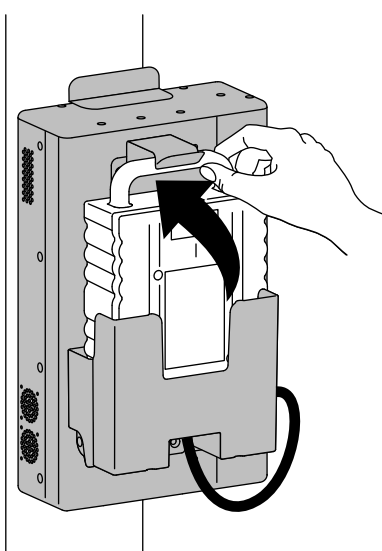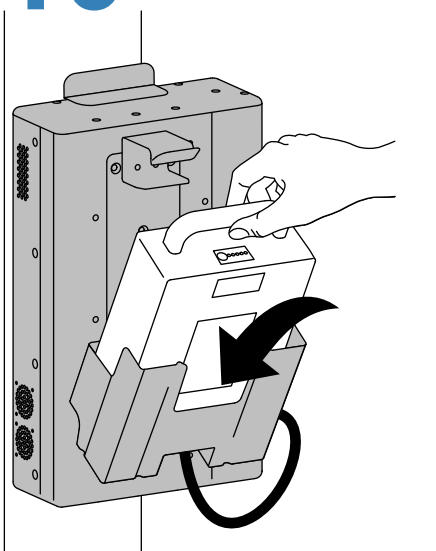

Avlägsna batteriet

SVENSKA

SLUT PÅ INSTALLATIONEN




Gå in på [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) för service och garanti

För lokala kundtjänstnummer, gå till: <http://contact.ergotron.com>



**OBS! När du kontaktar kundtjänst, hänvisa till serienumret.**

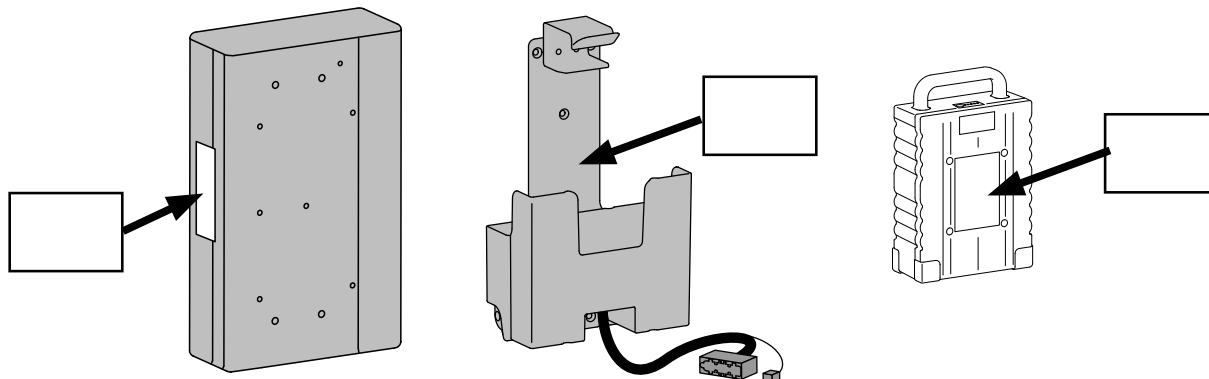

**ERGOTRON®**

© 2015 Ergotron, Inc.  
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

**Americas Sales and  
Corporate Headquarters**

St. Paul, MN USA  
(800) 888-8458  
+1-651-681-7600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[sales@ergotron.com](mailto:sales@ergotron.com)

**EMEA Sales**

Amersfoort, The Netherlands  
+31 33 45 45 600  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

**APAC Sales**

Tokyo, Japan  
[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[apaccustomerservice@ergotron.com](mailto:apaccustomerservice@ergotron.com)

**Worldwide OEM Sales**

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)  
[info.oem@ergotron.com](mailto:info.oem@ergotron.com)